


Talking Safety

Das Gerät wird auf dem Brust gehängt. Wenn man am Gehen und besonderes außerhalb des Hauses ist und zu Arbeit oder

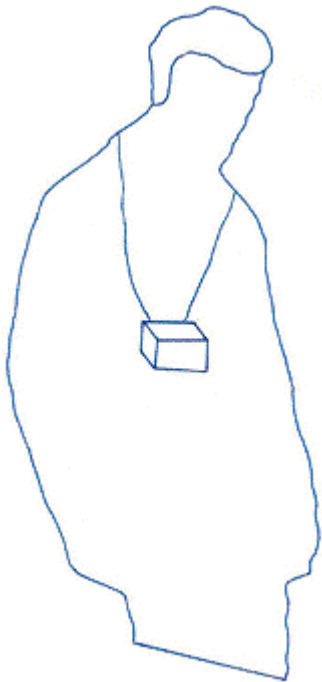

Position des Gerätes

Spazieren geht, macht man das Gerät an.

Wenn man das Gerät ausschalten will, drückt man diesen Schalter zurück.

Dieser Schalter ist an dem Gerät mit dem Tasten einfach zu finden. Daneben stehen die Worte „An“ oder „Aus“ sowie ihre Übersetzungen in Braille-Schrift.

Falls Sie die Stimme von gespeicherte Worte von Ihnen oder von einem

Person in Ihrem Verwandten Kreis wünschen, bitte einfach uns das schreiben oder telefonisch benachrichtigen.


Dann werden wir das Speicherung der Worte von dem Person, Sie wünschen hier am Gerät speichern. Wir empfehlen die Stimme von jemand Sie ihn oder sie mögen.

H. Zahedi
Diplom Informatiker und Elektrotechnik Ing.
Berliner Straße 103
Köln 510 63
Tel und Fax: 0221 - 640 28 60
☎ : 0173 180 72 08
e-Mail: h.zahedi@t-online.de

Wenn man zurück nach Hause kommt, ladet man wieder die Akkus. Das wird einfach mit dem Stecken den Kopf des Ausgang des Ladegerät an Buchse des Geräts. Lade Gerät ist mit dem Gerät geliefert.

Auf dem Gerät ist Platz von Buchse mit dem „Laden“ sowie seine Übersetzung in Braille-Schrift gekennzeichnet.

Einfach wie ein Kamera kann man das Gerät in verschiedene Richtungen drehen.

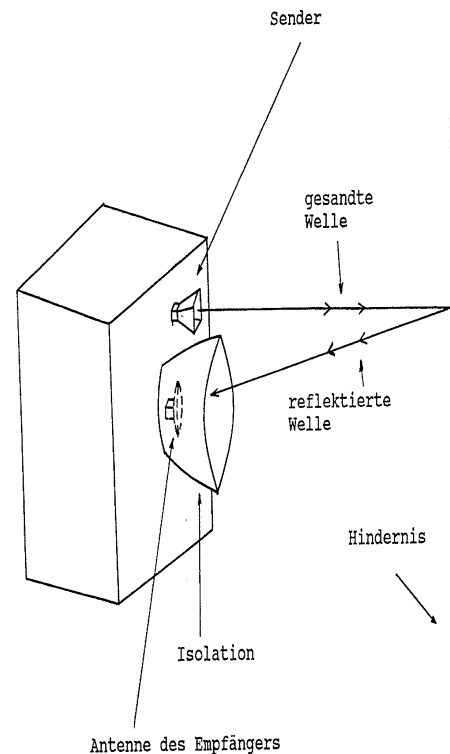

Wenn es im Bereich der Meldungen des Gerätes etwas gibt, wird das von Gerät angesagt.

Falls eine Hindernis in weniger als ein bestimmtes Abstand zu Mensch es gibt, meldet das Gerät sprachlich.

Auf dem Gerät sind die Aussagen gespeichert. Sie sind nicht maschinell sonder von Menschen gesagt.